

検査手順書 (SARS-CoV-2 変異株抗体検査サービス)

① 検査依頼書を記入

検査依頼書に必要事項をご記入ください。

※お手元に検査依頼書がない場合は下記のいずれかの方法で入手して下さい。

- ① 弊社HPにて検査依頼書をダウンロード
- ② TELまたはメールにて依頼
(TEL:086-286-9333 / Email:info@menekibunseki.com)



② 検体採取 (血清)

1. 採血・血清分離

採血・分離した血清をマイクロチューブなどに入れて下さい (血清1ml以上)。

検体を識別できるようにシール等で**ラベリングをお願いします** (チューブに直接手書きでも可)。



2. 凍結保存

採取した血清を凍結して下さい (-20℃以下)。



③ 検体発送

1) 下記2点を発泡スチロール容器等に入れて下さい。

- 血清 (ラベル貼付済、凍結状態)
 - 検査依頼書
- ※ 必要に応じて保冷剤やドライアイスと同梱して下さい

冷凍便



2) **冷凍便**にて弊社へご送付下さい。

<送付先> 〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀5303 ORIC213
免疫分析研究センター株式会社

3) 約2～4週間後、結果を書面にてご報告いたします。

- ・1日～15日に弊社へ到着した検体 ⇒ 当月末までに結果ご報告
- ・16日～月末に弊社へ到着した検体 ⇒ 翌月15日までに結果ご報告

